


DETECT

Alarmsender

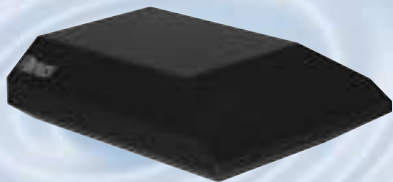

 Brugervejledning

 **Phonic Ear**[®]

yderligere information på www.phonicear.dk

indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------------|----|
| DETECTs funktion | 1 |
| DETECT indstillinger | 2 |
| DETECT tilbehør. | 6 |
| DETECT instruktioner. | 7 |
| Fejlsøgning. | 24 |
| Test og godkendelser | 26 |
| Sikkerhedsforanstaltninger | 27 |
| Garanti | 28 |

DETECT funktion

DETECT er en af PUZZLE systemets alarmsendere. DETECT opfanger lyden fra alarmer (f.eks. dørklokke, porttelefon, telefon, røgalarm, æggeur mm.), og alarmeren bliver trådløst overført til PUZZLE systemets modtagere. DETECT fungerer med følgende PUZZLE modtagere: CALL, FLASH, WAKE, POCKETVIB, LOOP, BEAM og LINK.

DETECT indstillinger

- 1 statuslys
Indikerer, at DETECT afsender en alarm
- 2 knap for batteritest
- 3 kabeltilslutning
Tilslutning af kabler
- 4 telefon-/mikrofonstik
Tilslutning til telefonstik i væg eller tilslutning af ekstern mikrofon
- 5 følsomhedskontrol
Følsomheden indstilles efter alarmens niveau
- 6 kanalvælger
Til indstilling af personlig kode og justering af frekvensfilter
- 7 alarmomskifter
Til indstilling af alarmmønster
- 8 filteromskifter
Deaktivering af frekvensfilter


DETECT indstillinger

- 9 mikrofonomskifter
Valg mellem intern og
ekstern mikrofon
- 10 antenne
- 11 intern mikrofon
- 12 skruetrækker
Til indstilling af personlig
kode og alarmmønster

DETECT indstillinger




Front

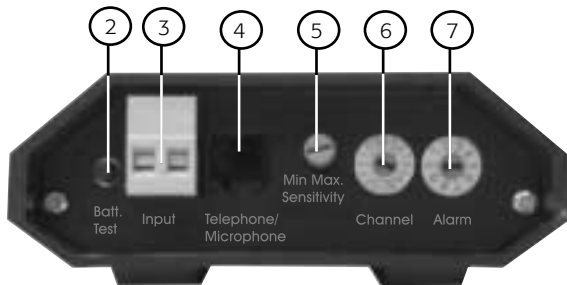


Bagside

DETECT indstillinger

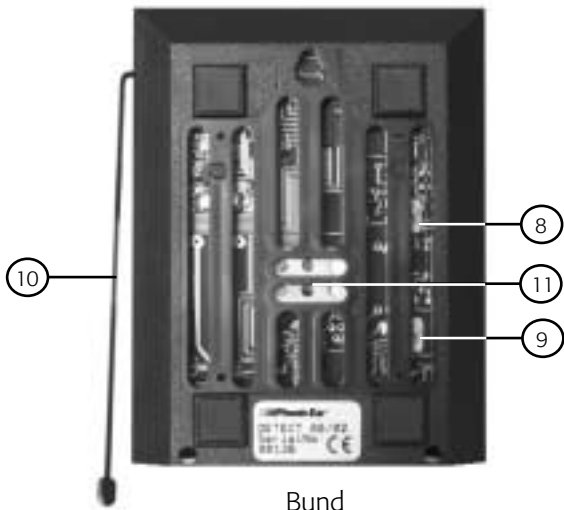


DETECT tilbehør (købes separat)

- 13 ekstern mikrofon
Kan anvendes til at
opfange komplicerede
lyde

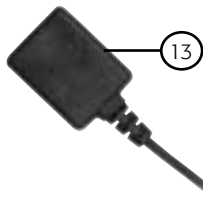

- 14 telefonledning
Tilslutning af
DETECT til telefonstik
i væg

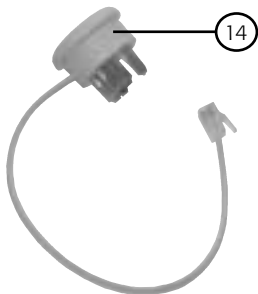

DETECT instruktioner

1 tilslutning af antenne



Sæt den blanke ende af den vedlagte antenne i **Antenna** udgangen på siden af DETECT og pres indtil antennen sidder godt fast.

DETECT instruktioner

2 placering af DETECT



Placér DETECT så tæt som muligt på den alarm, du ønsker at høre (f.eks. dørklokken eller telefonen).

Bemærk: Jo tættere du kan placere DETECT på lyd-kilden, jo mindre risiko er der for fejllarmmer.

DETECT instruktioner

3 installeringsmuligheder



DETECT kan installeres på væggen med en skrue eller med velcro-bånd (vær forsigtig med ikke at klistre mikrofonen til).

For at opnå den største rækkevidde skal antennen altid placeres vertikalt uafhængig af, om DETECT placeres på et bord eller installeres på væggen.

Bemærk: *DETECT skal altid placeres på en flad overflade.*

DETECT instruktioner

4a justering af frekvensfilter



Din DETECT er følsom over for en lang række almindelige lyde eller frekvenser i hjemmet. For at nedsætte risikoen for falske alarmer skal du indstille din DETECT, så den er mest følsom over den ene lyd/frekvens, som du ønsker, at den skal reagere på.

DETECT instruktioner

4b) justering af frekvensfilter



For at gøre dette skal du først indstille mikrofonfølsomhed til maksimum. Se [7a] og [7b]. Indstil så omskifteren mærket **Channel** til F, og tænd og sluk for DETECT (indstil **Alarm** omskifteren til 8 eller 9). Se [5a] og [5b]. Aktiver din lydkilde (dvs. ring på dørklokken, eller ring til din fastnettelefon fra en mobiltelefon, så telefonen ringer). Hvis det røde lys på DETECT ikke bliver tændt, når lydilden er aktiv, skal du dreje **Channel** omskifteren et trin med uret til E, D, og så videre, indtil lyset bliver tændt. Husk, at slå DETECT fra og til efter hvert trin på **Channel** omskifteren. Se [5a] og [5b]. Hvis det røde lys stadig ikke bliver tændt på det tidspunkt, hvor **Channel** omskifteren er blevet drejet med uret til 0, skal du deaktivere frekvensfiltret og justere følsomheden. Se [8].

DETECT instruktioner

5a valg af alarmmønster



Alarmmønstret, som DETECT sender til PUZZLE systemets modtager, vælges ved at benytte omskifteren mærket **Alarm** på bagsiden af DETECT.

Bemærk: Den vedlagte skruetrækker anvendes til at indstille den personlige kode.

DETECT instruktioner


5b valg af alarmmønster



Positionerne 1-7 er de forskellige alarmmønstre, som kan sendes til PUZZLE systemets modtagere, når DETECT er aktiveret. Position 0 sender et alarmmønster for at indikere batteriskift. Indstilles omskifteren på position 8 eller 9 slukkes DETECT. Hvis du for eksempel vælger alarmmønster 1 for DETECT placeret ved dørklokken, skal du vælge alarmmønster 2 for DETECT placeret ved telefonen, og så videre. Hver alarm har sit eget alarmmønster, så du kan blive fortrolig og tryk ved de forskellige alarmmønstre.

DETECT instruktioner

6 indstilling af personlig kode

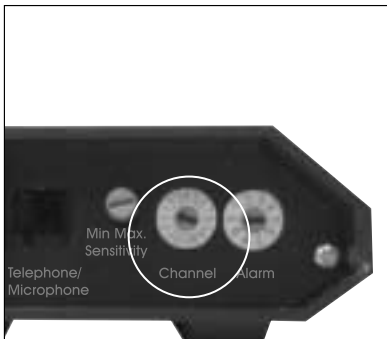

Bemærk: Den vedlagte skrue-trækker anvendes til at indstille den personlige kode.

Brug omskifteren mærket **Channel** på bagsiden til indstilling af personlig kode. PUZZLE systemets forskellige modtagere bør indstilles til den samme personlige kode.

Det er vigtigt at justere frekvensfiltret inden valg af den personlige kode. Se **4**.

Bemærk: For at undgå at skulle ændre frekvensfiltret skal du sørge for, at der er tændt for DETECT inden valg af personlig kode (**Alarm** omskifteren bør indstilles til 1-7). Se **5b**.

DETECT instruktioner

7a justering af mikrofonfølsomhed



DETECT's mikrofonfølsomhed bør justeres så lavt som muligt for at minimere muligheden for falske alarmer. Dette foretages ved hjælp af kontrollen **Sensitivity** på bagsiden af DETECT.

Drej kontrollen helt i bund mod uret for at minimere følsomheden.

Drej derefter kontrollen langsomt med uret samtidig med, at telefonen eller ringeklokken aktiveres.

DETECT instruktioner


7b justering af mikrofonfølsomhed



Når det røde lys på forsiden af DETECT lige netop bliver tændt, eller én af PUZZLE systemets modtagere begynder at udsende et signal, er følsomheden korrekt indstillet.

DETECT instruktioner

8 deaktivering af frekvensfiltret

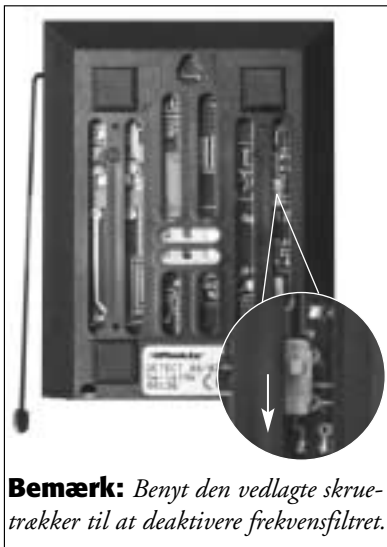

Bemærk: Benyt den vedlagte skrue-trækker til at deaktivere frekvensfiltret.

Hvis du har en alarm med mørke/dybe toner (bas), er det muligt at deaktivere frekvensfiltret ved at ændre afbryderens position, som er synlig i det aflange hul i bunden af DETECT.

Skub afbryderen mod bagsiden af DETECT og gentag indstillingerne beskrevet i [7a] og [7b].

DETECT instruktioner

9 tilslutning af ekstern mikrofon




For at anvende den eksterne mikrofon sammen med DETECT skal du tilslutte den eksterne mikrofon til stikket **Telephone/Microphone**.

Den eksterne mikrofon kan anvendes til at opfange mere komplicerede lydkilder, hvis lydniveauet er for svagt til, at den interne mikrofon kan opfange dem.

Bemærk: Den eksterne mikrofon er tilbehør og købes separat.

DETECT instruktioner

10 valg af mikrofon

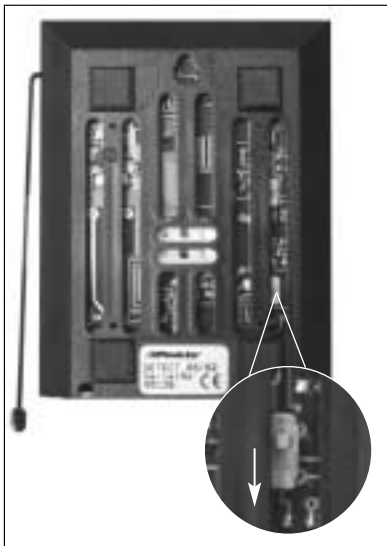

Indstil mikrofonvælgeren til ekstern mikrofon ved at skubbe afbryderen i retning af bagpanelet eller til intern mikrofon ved at skubbe afbryderen i retning af forkanten.

Bemærk: Den vedlagte skruetrækker anvendes til at indstille mikrofonvælgeren.

DETECT instruktioner

11 opsætning af ekstern mikrofon



Fjern tapen, der dækker bunden på den eksterne mikrofon, og anbring mikrofonen over lyd-kilden.

Juster mikrofonens følsomhed ved at følge fremgangsmåden beskrevet under [7a](#).

Bemærk: Den eksterne mikrofon er tilbehør og købes separat.

DETECT instruktioner

12 tilslut input



Bemærk: *Er det nødvendigt at aktivere tilslutningen, anbefales det, at din autoriserede forhandler/installatør foretager dette.*


Brug stikket **Input**, hvis det ikke lykkes at opfange lyd ved hjælp af den indbyggede eller den eksterne mikrofon.

Stikket **Input** aktiveres, hvis de to terminaler kortsluttes, eller hvis der forbindes en strømstyrke på mellem 3 og 24 V AC eller DC til de to terminaler.

Når tilslutningen er foretaget sender DETECT den alarm, der er blevet valgt på **Alarm** omskifteren på bagsiden af DETECT.

DETECT instruktioner

13 telefonindgang

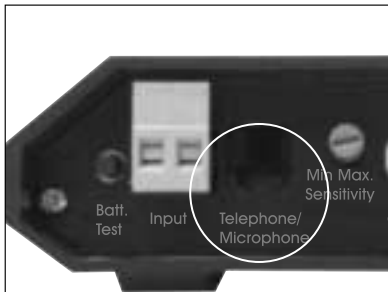

Bemærk: Indgangen kan benyttes, hvis DETECT ikke opfanger ringetonerne fra telefonen tilfredsstillende. Mikrofonens følsomhed skal indstilles til minimum. Se [7a](#). Deaktiver frekvensfilter. Se [8a](#).

Telefonindgangen tilsluttes telefonstikket på væggen ved at benytte en telefonledning.

Telefonindgangen aktiveres, når telefonen ringer.

Når tilslutningen er aktiv, sender DETECT den alarm, der er blevet valgt på **Alarm** omskifteren på bagsiden af DETECT.

DETECT instruktioner

14 test af batteriet



Tryk på knappen **battery test** med regelmæssige mellemrum for at teste batterikapaciteten. Det røde lys foran på DETECT bør tændes. Hvis det ikke er tilfældet, så følg fejlsøgningsmulighederne på side 24.



fejlsøgning

Fungerer din DETECT alarmsender ikke tilfredsstillende, bedes du kontrollere de enkelte fejlmuligheder nedenfor:

Den røde lampe på fronten af DETECT lyser ikke, når du trykker på knappen "Batt Test" på bagsiden af DETECT:

- Kontrollér, at kanalomsifteren **Alarm** på bagsiden af DETECT ikke er indstillet i position 8 eller 9 (i så fald er DETECT slukket).
- Få din autoriserede forhandler/installatør til at udskifte batteriet.

Den røde lampe på fronten af DETECT lyser, når knappen »Batt Test« aktiveres, men DETECT modtager ikke alarm-signaler fra f.eks. dørklokke eller telefon:

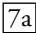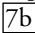- Kontrollér, at følsomheden på mikrofonen er indstillet korrekt. Se punkt  . Hvis problemet fortsætter, bør du overveje at benytte den eksterne mikrofon.
- Drej omsifteren mærket **Sensitivity** på bagsiden af DETECT helt mod uret og afprøv DETECT ved forskellige placeringer omkring f.eks. dørklokken eller telefonen.

fejl søgning (fortsat)

Den røde lampe på fronten af DETECT lyser, når der trykkes på knappen mærket »Batt. Test« på DETECTS bagside, men kun nogen eller ingen af PUZZLE systemets modtagere afgiver signal:

- Kontrollér, at den personlige kode på henholdsvis DETECT og PUZZLE systemets modtagere er indstillet ens. Se punkt 6.

PUZZLE systemets modtagere afgiver signal

- tilsyneladende uden grund:

- Kontrollér, at mikrofonens følsomhed er korrekt justeret. Se punkt 7a og 7b. Hvis problemet fortsætter, bør du overveje at bruge den eksterne mikrofon.
- Skift den personlige kode ved hjælp af drejeomskifteren mærket **Channel** på DETECTS bagside. Se 6. PUZZLE systemets forskellige modtagere skal indstilles til den samme personlige kode.

Afhjælper ovenstående ikke problemet, kontakt da venligst din lokale autoriserede Phonic Ear forhandler/installatør.

test og godkendelser

DETECT er godkendt og CE-mærket i henhold til R&TTE direktivet.

Kontaktinformation:

Phonic Ear A/S
Strandvejen 58
2900 Hellerup

sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel

Litium-batteri indeni. Fare for brand, eksplosion og alvorlige forbrændinger, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Må ikke genoplades, skilles ad, opvarmes til over 100°C, forbrændes eller udsættes for vand eller direkte sollys.

Før at forhindre kortslutning skal du sørge for, at metalgenstande ikke kommer i berøring med batteriet eller konnektorer på telefon/mikrofon.

Lad være med at adskille, ændre eller udsætte dette produkt for tryk, så der kan opstå skader på elektroniske kredsløb, hvilket kan medføre en svækkelse af produktets sikkerhedsforanstaltninger.

Vigtig bemærkning

Litium-batterier må ikke åbnes eller forbrændes. Udsættelse for stoffer indeholdt i produktet eller opstået i forbindelse med afbrænding heraf vil kunne medføre personskaade.

garanti

Phonic Ear yder en 2 års begrænset garanti på nye produkter.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller design-fejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejls opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

- 1 Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
- 2 Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 30 dage fra faktureringsdatoen.
- 3 Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
- 4 Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
- 5 Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.

garanti

- 6** Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produkterne ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Din lokale forhandler:



Telefon: 3917 7101
webside: www.phonicear.dk